



Brugervejledning

EZ-OX

MEDICINSK OXYGEN 2L

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret.
Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.

EzOx

MEDICINSK OXYGEN 2L

Brugsanvisning

Før brug

- Kontrollér den resterende mængde gas på manometeret **1**.
- Kontrollér at der kommer gas når flowregulatoren **2** drejes.

Ved brug med flowudgang **3** (tilkobling af slange)

- Tilslut slangen til flowudgangen **3**.
- Drej flowregulatoren **2** med uret til det ønskede flow.
- Kontrollér at patienten modtager gas.

Efter brug med flowudgang **3** (tilkobling af slange)


- Stop flowet ved at dreje flowregulatoren **2** tilbage til "0".

Ved brug med lynkobling **4**

- Tilslut udrustningen (for eksempel en ventilator) til en slange.
- Tilslut derefter slangen til lynkoblingen **4**: gas er nu tilgængelig.
- Kontrollér at patienten modtager gas.

Efter brug med lynkobling **4**

- Det anbefales at afmontere slangen fra lynkoblingen **4** for at undgå unødigt forbrug.

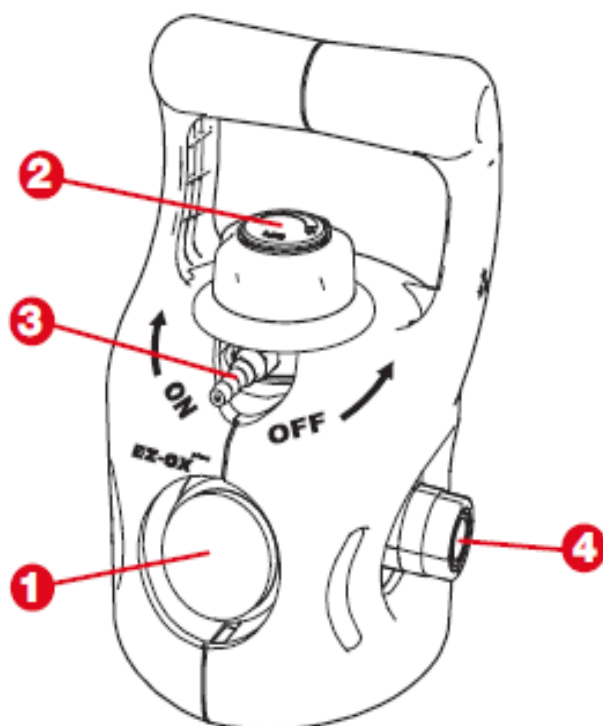

Anvendelsestid for 2-liters beholder (400 liter gas)

| TRYK | FLOW | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| | 1 liter/minut | 3 liter/minut | 6 liter/minut |
| 200 bar | 6 timer 40 min | 2 timer 10 min | 1 time 07 min |
| 150 bar | 5 timer 00 min | 1 time 40 min | 50 min |
| 100 bar | 3 timer 20 min | 1 time 05 min | 33 min |
| 50 bar | 1 time 40 min | 30 min | 17 min |