

Udskift batteri/ bordoplader



Træk batteriudløserknappen nedad og væk fra FreeStyle Comfort. Samtidig med at denne knap HOLDES NEDE, skal du føre batteriet ud, ved at trække det væk fra koncentratoren.



Hvis du vil kontrollere batteriets ladetilstand, når det ikke er sat i, skal du lægge batteriet fladt ned og trykke på knappen TEST. Batterimålerindikatorerne til højre for knappen TEST, tændes for at angive batteripakkens ladetilstand (25-100 %).



FreeStyle Comfort ekstern bordoplader til at oplade dine ekstra batteripakker, mens de ikke er i brug på din bærbare iltkoncentrator. Perfekt til aktive brugere, der har brug for ekstra batterier eller rejser ofte og altid skal have en fuld opladning klar til at gå!

Flytransport

Din FreeStyle Comfort er egnet til brug om bord på fly og opfylder alle krav fra den amerikanske Federal Aviation Administration (FAA). Kontakt rejseselskabet mindst 48 timer før afrejsen for at informere dem om, at du rejser med en FreeStyle Comfort. FAA kræver ikke, at passageren konsulterer sundhedspersonale, før en FreeStyle Comfort POC anvendes om bord på et fly. Du kan dog have interesse i, at konsultere følgende med sundhedspersonalet:

- Effekten af en trykisolaret kabine (kabinetrykhøjden kan nå 8.000 fod) på dit iltbehov. - Nogle ilt-brugere behøver en højere indstilling af ilt i et fly, på grund af kabinetrykhøjden. Dine iltbehov på rejsetidspunktet, og hvorvidt dine behov har ændret sig, siden FreeStyle først blev ordineret eller under den seneste konsultation med sundhedspersonale.

VIGTIGT: Flyselskaber kan kræve, at du medbringer tilstrækkeligt mange batterier til at strømforsyne enheden i mindst 150 % af flyvningens forventede maksimale varighed.



For at forhindre kortslutninger, skal de ekstra batterier beskyttes individuelt, ved at blive anbragt i den oprindelige emballage eller ved anden terminalisolering, f.eks. ved at sætte tape hen over udsatte terminaler eller ved at anbringe hvert batteri i en separat plastikpose eller et beskyttelsesetui, og de må kun transporteres i håndbagagen.

Batteri tid

Denne tabel er vejledende og beregnet ud fra 20 indåndinger i minuttet. Udstyret aflæser vejrtrækningsfrekvens, og er der behov for mere eller mindre ilt, vil varigheden ændre sig. Det vil altid være en god ide, at teste aktivitetsbehov.

Indstilling	Ilt-flow	1 små batteri	2 små batteri	1 stort batteri	2 store batteri
1	210 ml/min.	8 t.00 min.	16 t.00 min.	16 t.00 min.	32 t.00 min.
2	420 ml/min.	4 t.00 min.	8 t.00 min.	8 t.00 min.	16 t.00 min.
3	630 ml/min.	3 t.00 min.	6 t.00 min.	6 t.00 min.	12 t.00 min.
4	840 ml/min.	2 t.15 min.	4 t.30 min.	4 t.30 min.	9 t.00 min.
5	1050 ml/min.	2 t.00 min.	4 t.00 min.	4 t.00 min.	8 t.00 min.

Rengøring

Enheden er vedligeholdelsesfri. Filtre inde i enheden er beregnet til at vare enhedens levetid. Brugeren af denne enhed bærer ansvaret for nedenstående vedligeholdelsesprocedurer.

Ugenligt - Rengøring af to luftfilter:

1. Fjern de to filtre fra forsiden, ved at trykke den tilsvarende tap opad og trække den udad.
2. Vask begge filtre i en varm opløsning af sæbe og vand.
3. Skyl filtrene grundigt, og fjern overskydende vand med en blød, fnugfri klud. Sørg for, at filterene er helt tørre, inden de sættes på plads.
4. Isæt de rene, tørre filtre igen.



Version : 02. 2022-03 / V006022



VitalAire
Leverandør af livskvalitet

Brugervejledning

FreeStyle® Comfort® Bærbar ilt-koncentrator

CAIRE®

Specifikationer

Dimensioner: 25,4 x 7,9 x 18,5 cm
Vægt: 2,3 - 2,7kg
Lydniveau: 39,93 dBA i gennemsnit
Iltprocent: 93 +/- 3%
Strøm: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Puls vol. ved 20 BPM

1. 11 ml	210 ml/min.
2. 22 ml	420 ml/min.
3. 33 ml	630 ml/min.
4. 44 ml	880 ml/min.
5. 52 ml	1050 ml/min.

+/- 15% eller 2 ml (mere end 20 puls i min.)





Telefon 44 92 35 44

www.vitalaire.dk - kontakt@vitalaire.dk

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret. Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.

Lær din FreeStyle Comfort at kende

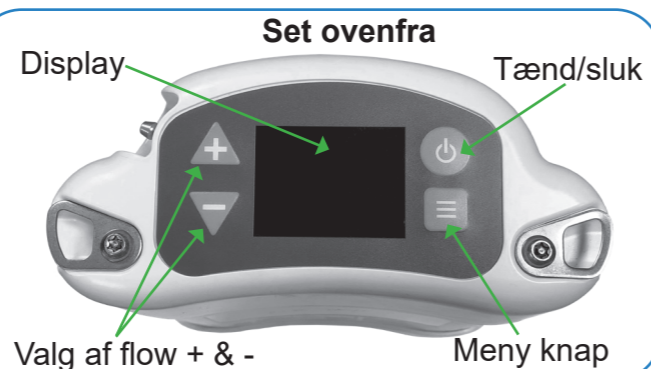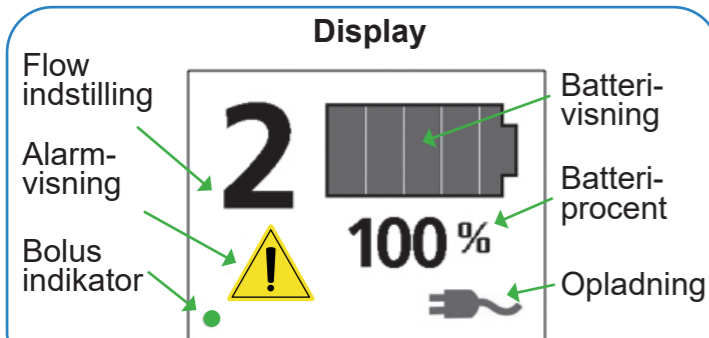

Sikkerhedsforskrifter

Produktet tåler ikke:

Inaktivitet i en længere periode, bør anvendes mindst 2 timer om ugen, for at fungere optimalt. At blive tabt, eller tildækket, produktet kræver tilførelse af ny luft under anvendelse.

Det anbefales, at bruge dette produkt under aktivitet, både inde, udendørs og under transport.

Tobaksrygning samt brug af åben ild, er forbudt i nærheden af produktet.

Følg altid det angivne ilt-trin. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!

Hold altid en sikkerheds afstand til åben ild på mindst 2 meter

Dit ilt-trin _____



Kom godt i gang

Anbring FreeStyle Comfort et sted, der er egnet til anvendelsen. Koncentratoren skal være godt ventileret således, at luftindtagsfiltrene og luftudtaget ikke blokeres.




1 Installer batteriet

Før batteriet indad, indtil du hører et klik, som bekræfter, at det er låst fast.



2 Bæretaske

Anbring systemet i bunden af tasken, og sørg for at placere filtrene og batteriåbningerne korrekt. Luk lynlåsen rundt om bunden af tasken.

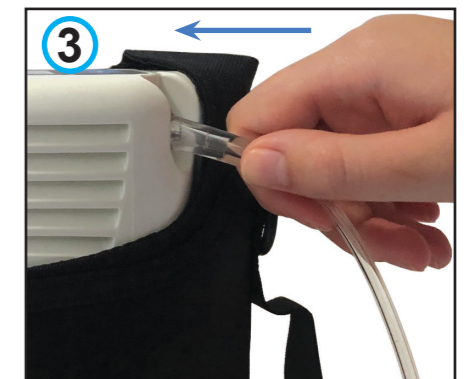

3 Næsekanyle (Ilt-brille)

Tilslut en næsekanyle til iltudtagsstudsene. Sørg for, at den er tilsluttet korrekt inden brug.



4 Tænd

Ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Der udsendes et kortvarigt lydsignal, som angiver, at enheden er tændt.



5 Flow

Vælg den foreskrevne flowindstilling ved hjælp af knappen til øgning (+) eller reduktion (-) af flow.



6 Menu, undervisning påkrævet


Fire menuskærbilleder:


1. Statusskærbillede
2. Flytilstand (TIL/FRA)
3. Følsomhed: justerbar (1-5)
4. autoSAT (TIL/FRA)

Brug af strømkilde

Til brug i bil/fritidskøretøj/båd/privatfly

Tilslut DC-stikket til strømkilden. Stikket skal forblive på plads.

Et ikon vises på displayet,  der angiver, at ekstern strøm er tilsluttet og fungerer korrekt. Sørg for at bilens DC udtag understøtter minimum 15 Amp., hvis ikke kan belastningen beskadige bilens sikring og ledningsnet.

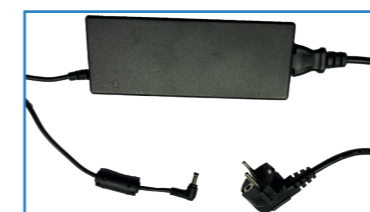

Brug af AC fra 110 til 240 V

Kan bruges i alle lande der har en AC spænding mellem 110 og 240 V. Husk at medbringe en overgangs adapter, hvis det er påkrævet.

