


## Udskiftning af batteriet under drift



Sluk for iGo2. Tag fat om batterihætten, træk op i en lige bevægelse og isæt derefter et opladet batteri, indtil det klikkes på plads.

For at kontrollere opladningsniveauet på et reservebatteri, skal du blot trykke på batteristatusknappen **BEMÆRK!** Hver bjælke på indikatoren for batteriniveau angiver 25 % af den samlede opladningskapacitet. iGo2 vil fungere i mindst 3,5 tim ved en indstilling på 2 ved 20 åndedrag pr. minut ved et nyt fuldt opladet batteri.

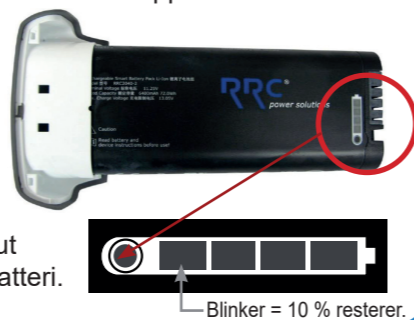

## Oplad Batteri

### Intern opladning

For at oplade batteriet til iGo2 skal du blot tilslutte strømforsyningen til en AC (stikkontakt) eller DC-strømkilde (bil) ved hjælp af den rigtige strømledning. Ikonet for batteriopladning lyser på displayet under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet.



### Ekstern batterioplader

1. Slut strømforsyningen til ekstern batterioplader. Tilslut ledningen til en stikkontakt 2. Skub batteriet ned i skinnen på ekstern oplader, så den er låst. 3. Når batteriet er i den rigtige position, vil et lys angive, at batteriet oplades. 5. Når det grønne lys tændes, er batteriet fuldt opladt.



## Batteri tid

Denne tabel er vejledende og beregnet ud fra 20 indåndinger i minuttet. Udstyret aflæser vejrtrækningsfrekvens, og er der behov for mere eller mindre ilt, vil varigheden ændre sig. Det vil altid være en god ide, at teste aktivitetsbehov.

Indstilling	lft-flow	1 batteri		
1	260 ml/min.	3t. 53 min		
2	440 ml/min.	3 t. 59 min.		
3	725 ml/min.	2t. 24 min		
4	880 ml/min.	1t. 56 min		
5	1014 ml/min.	1t. 39 min		

## Rengøring

### Filter rengøring

Partikelfilteret skal rengøres ugentligt for at sikre, at det er let luftstrøm. Fjern filter fra forsiden af enheden. Rengør partikelfilter med et mildt vaskemiddel og vand; skylles derefter i vand og tørres før isættelse.

### Rengøring af kabinnet

Rengør iGo2 yderkabinnet og batteri efter behov:

1. Sørg for, at batteriet er installeret mens kabinettet rengøres. 2. Rengør yderkabinettet med en fugtig klud eller svamp dyppet i et mildt rengøringsmiddel, og tør efter. Hvis batteriet er taget ud, kan batterihuset aftørres, men kun med en tør klud.

## Specifikationer

**Dimensioner:** 21,3 x 8,9 x 21,8 cm

**Vægt:** 2,20kg. med 1 batteri

**Lydniveau:** <37 dBA i gennemsnit

**lftprocent:** Bolus 1-5 = 91 +/- 3%

**Strøm:** 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

### Puls vol. ved 20 BPM

1.	13,0 ml	260 ml/min.
2.	22,0 ml	440 ml/min.
3.	36,3 ml	725 ml/min.
4.	44,0 ml	880 ml/min.
5.	50,7 ml	1014 ml/min.
5SD.	55,0 ml	1100 ml/min.



+/- 25% eller 6 ml (mere end 20 puls i min.)

Version : 01 : 2024-05 / V006287



**VitalAire**  
Leverandør af livskvalitet

Brugervejledning

# iGo<sup>®</sup>2

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Bærbar ilt-koncentrator

[www.vitalaire.dk](http://www.vitalaire.dk)

[kontakt@vitalaire.dk](mailto:kontakt@vitalaire.dk)

### iGo2 - systemet


**Tilslutning ilt-kateter**  
**Kontrolpanel**  
**USB-port (ikke til patient-brug)**  
**Batteri**  
**Ventilationshuller (i begge sider)**  
**Tilslutning strømkilde (DC)**

**Ilt-dosis (-) (+) knap**  
**Tænd/sluk-knap**

**Ekstra batteri og ekstern oplader**  
**110 til 240V AC forsyning**  
**12V strømforsyning (bil)**

### Kom godt i gang

- 1** Tilslut ilt-kateter (Ilt-brille) tilslutningen er placeret på toppen af enheden
- 2** Hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde iGo2 **BEMÆRK!** Når din iGo2 er tændt, aktiveres alarmtone, og displayet viser timetælleren i 3 sekunder
- 3** Brug knapperne "+" og "-" til at indstille din ordinerede ilt-dosis.
- 4** Hvis du vil bruge apparatet i SmartDose-tilstand, skal du trykke på knappen SmartDose <SD>.
- 5** Placer ilt-kateter (Ilt-brille) som vist og træk vejret normalt igennem ilt-katetret. iGo2 vil registrere din indånding og levere en mængde ilt, når du indånder.
- 6** Når du er færdig med at bruge apparatet, skal du holde tænd/sluk knappen nede for at slukke iGo2.

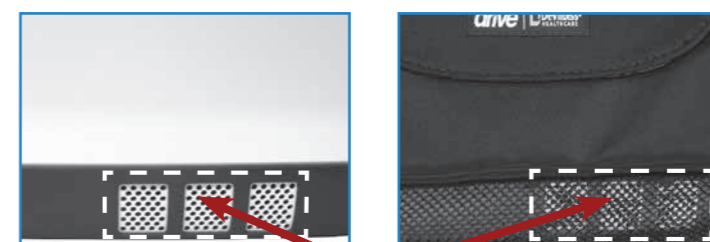

**⚠ VARM**  
**⚠ ADVARSEL**  
Dette område kan udsende varm udstødnings-luft. Placer ikke i nærheden af bar hud.

### Sikkerhedsforskrifter

#### Produktet tåler ikke:

Inaktivitet i en længere periode, bør anvendes mindst 2 timer om ugen, for at fungere optimalt. At blive tabt, eller tildækket, produktet kræver tilførelse af ny luft under anvendelse.

Det anbefales, at bruge dette produkt under aktivitet, både inde, udendørs og under transport.

Tobaksrygning samt brug af åben ild, er forbudt i nærheden af produktet.

Følg altid det angivne ilt-trin. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!

Hold altid en sikkerheds afstand til åben ild på mindst 2 meter


Dit ilt-trin \_\_\_\_\_



### Brug af strømkilde

#### Batteristrøm

Din anordning skal altid have et batteri installeret for at kunne fungere. Din transportable iGo2-iltkoncentrator anvender batteristrøm, hvis ingen and strømkilde er tilgængelig. Hvis vekselstrøm (AC) eller jævnstrøm (DC) imidlertid er tilsluttet, vil iGo2 køre med denne strømkilde og derved bevare batteriets opladningsniveau. Hvis den anden strømkilde er afbrudt, skifter anordningen automatisk til batteristrøm.

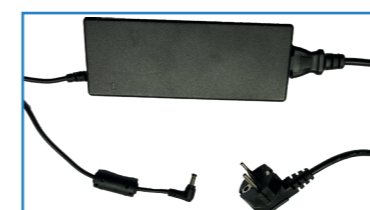

#### Brug af AC fra 110 til 240 V

Kan bruges i alle lande der har en AC spænding mellem 110 og 240 V. Husk at medbringe en overgangs adapter, hvis det er påkrævet.

