

# Rengøring

## Advarsel

Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden produktet rengøres

## Vand

Anvend kun den reneste vandkvalitet til rengøringen. Det er vigtigt at tage hensyn til vandets hårdhed, da aflejringer på medicinske produkter ikke altid kan dekontamineres effektivt. Brug deioniseret vand for at mindske dette problem

## Engangsprodukter

Dette er produkter til engangsbrug, der ikke må genanvendes. Genbrug kan medføre krydskontaminering

## Afmontering

Skil udstyret ad i alle dets forskellige dele før rengøring og desinficering

## Rengøring af beholdere og låg

Rengør komponenterne i varmt vand (60-70 grader), som indeholder et vaskemiddel med en pH-værdi mellem 6,0 og 8,0.

1. Læg alle dele i blød i varmt sæbevand (60-70 grader) eller enzymholdigt vaskemiddel i 1-5 minutter.
2. Fjern sunligt snavs med rengøringsredskab - en almindelig børste eller for eksempel piberensere eller bløde bomuldsklude. Skyl grundigt med rent vand. Lad tørre.
3. Efterse delene for synligt snavs, og gentag ovenstående trin efter behov.

Beholderne/lågene kan alternativt rengøres i en opvaskemaskine.

## Rengøring af pumpehus, netledning og plastictilbehør

Tør af med det vaskemiddel, der anbefales af sundhedsfagligt personale.

Tør efter med en ren klud



Medela - Vario 18 AC

Brugervejledning



## Medela - Vario 18 AC/DC

Din læge har ordineret Vario 18 til sugning af luftveje. Denne sugepumpe fra Medela er af høj kvalitet og er let at håndtere og rengøre samt udstyret med sikkerhedsfunktioner, der sikrer optimal drift.

Vario 18 sug er let, men robust, bærbar sug, som er designet til kontinuerligt sug og til luftvejssugning med lavt støjniveau. Vario 18 garanterer maksimal sugeevne til en række konstante og intermitterende sugebehov, såsom mavesugning, luftvejsugning eller lign.

Membranvakuumregulatoren på Vario 18 muliggør præcise vakuuminstillinger. Du juster blot vakuummets ved at trykke på knappen og dreje den. Indstillingerne er ikke kun præcise, men sikkerhedsknappen forhindrer også utilsigtet genjustering.

### Opsamlingsystem til engangsbrug




- 1) Sæt Vario 18-beholderadapteren (blåt stykke) på pumpens holder



- 2) Klargør 1,5 L-beholder (gul stribe).

Indsæt posen med de gule propper øverst, der følger med til poserne.

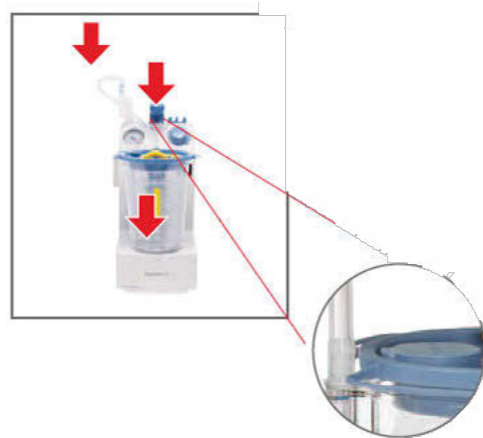

- 3) Monter beholderen på pumpen.

Tilslut slangen til filteret.

Tilslut slangen til beholderen (slangen er oven på beholderen).



- 4) Tag det farvede vinkelstykke fra posen låg, og sæt det ind i porten mærket "patient"

Tilslut patientslangen (fingerspidsslangen, der leveres sammen med pumpen) til det farvede vinkelstykke.



**FORSIGTIG**  
Slang og andet sterilt tilbehør må ikke anvendes, hvis den sterile emballage er beskadet. Produkter til engangsbrug og sterile produkter må ikke genanvendes

### Opstart af Vario 18 sug

#### Tilslut Vario 18 til strømforsyningen

Sæt ledningens netstik i en stikkontakt



1. Tænd for Vario 18. suget/pumpen vil begynde at køre.



2. Fastgør patientslangen.  
Tryk og drej vakuumregulatoren til det korrekte vakuum i henhold til din lægens anvisninger.

**OBS!** Brug kun det vakuumniveau, der anbefales af dit sundhedspersonale/din læge.

Kontroller vakuummåleren.


### Nedlukning efter brug



Stil sluk-kontakten på Vario 18 i position "0"

Rengør og desinficer Vario 18 suget/pumpen (Se rengøring bagerst i vejledningen)

### Udskiftning af engangspose

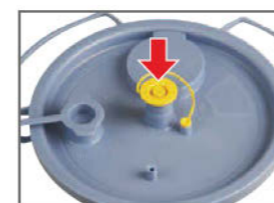

1. Fjern patientslangen med det farvede vinkelstykke fra låget

Tilprop patientporten



2. Sluk for Vario 18

Sænk vakuummets til minimum ved at trykke og dreje vakuumregulatoren mod venstre.




3. Fjern den fulde pose fra beholderen.

Bortskaf posen og patientslangen i henhold til sundhedspersonalets anvisninger



5. Gør klar en ny pose, pak den ud, og sæt den ind i beholderen. Tryk låget ned.

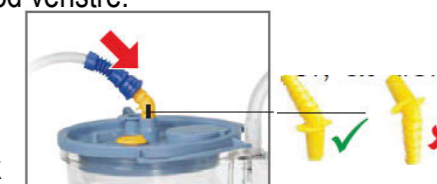

6. Tilslut en ny patientslange og sørg for, at den sidder godt fast.

Tænd for Vario 18. Indstil Vakuummets efter anvisninger.