

NIV

Hurtig start

Start

Behandling

1. Påfør masken korrekt, som anvist af NIV sygeplejersken (se billeder på maskeposen).
2. Tryk på START/STOP-knappen øverst på enheden



Stop Behandling

1. Tryk på START/STOP-knappen øverst på enheden.
2. Fjern masken.
3. Søvnrapporten på skærmen viser nu det antal timer, enheden blev brugt i løbet af den sidste nat.



👍 > 6 timer

👎 < 6 timer

Brug MINIMUM 6 timer hver nat!





Brugermanual

Klargøring



1

Sæt apparatet på en stabil jævn overflade. Slut strømstikket til strømindsættaget på apparatet og sæt stik i kontakten

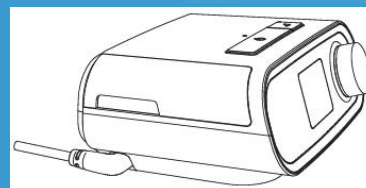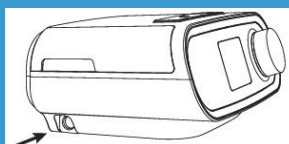



2

Sæt luftslangen godt fast på toppen af apparatet.




3

Åben fugtrlåget, fjern tanken og fyld den med kogt koldt vand til MAX.mærkingen. Indsæt forsigtigt vanstanken og luk låget til indtil det klikker.

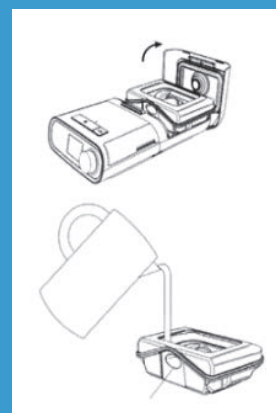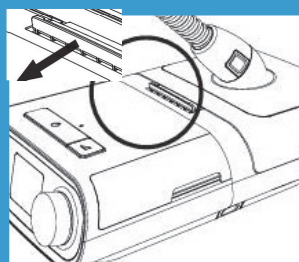


4

Sæt luftslangens frie ende godt fast på den samlede maske.

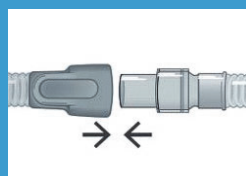

Hvis ordineret ilt, tilkoble iltet på mellem stykket. Det sidder mellem luftslangen og masken.

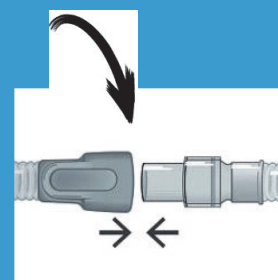

Rengøring

Tør maskinen af med en klud opvredet i mild opvaskemiddel og vand hver dag



1

Slange

Vask i varmt vand tilsat mild sæbe

2

Skyld den grundigt og lad den hænge til tørre

1

Filtre

Blå: 1x om ugen
Skyl undervandhanen og lufttørre/ blæs

2

Blå:
Hver 6. måned
Udskift filteret

3

Lyseblå:
Allergifilter
Udskift
hver måned



Maske

2

Hver måned

Vask remmene i hånden eller i maskinen ved 30 grader

1

Hver dag

Tør den af med klud med mild sæbe



Mild sæbe:

Opvaskemiddel
Alkohol- og
blegemiddelfri!




Fugtkammer

Hurtig start


1

Tilslut fugtkammer til NIV-apparatet (Tryk på den grå knap for at afkoble igen)

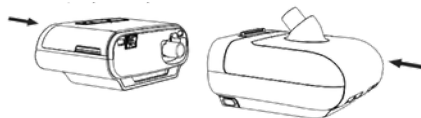

2

Åben låget til fugtkammeret

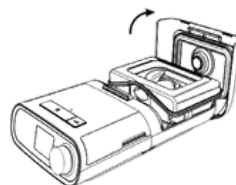

3

Fyld fugtkammeret med afkølet kogt vand op **MAX**-linjen



> 6 timer



< 6 timer

Brug **MINIMUM** 6 timer hver nat!



Type vand, der skal anvendes = kogt kold vand eller købt demineraliseret vand

Kalkaflejring
Rens med en blanding af klar eddike og varmt vand (1 del eddike til 10 dele vand).

Vedligeholdelse af fugtkammer

Dagligt

- Tøm kammeret for resterende vand
- Tør med en ren klud
- Lad det lufttørre

Ugentligt

Rengør med mild sæbe
Skyl kammeret grundigt

Tips til at undgå kondens

1

Placer apparatet under hoved niveau

2

Undgå træk på apparatet

3

Mild temperatur i rummet

4

Undgå direkte sollys og varme