



Brugervejledning

Regular ventil

MEDICINSK OXYGEN 10L

www.vitalaire.dk
kontakt@vitalaire.dk

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du benytter ilt-udstyret.
Er du stadig i tvivl om betjeningen, efter personlig instruktion, anbefales du at kontakte os.



Flasken kommer med en hvid prop.

1. Den hvide prop tages af inden brug.



2. Flasken er nu klar til at få påsat en ventil



3. Når ventilen er påsat drejes det sorte håndtag.

OBS!!!

Der må ikke drejes på det sorte håndtag, før der er påsat en ventil.



Hvor længe holder en flaske ilt?

Flaske	2 liter	2,5 liter	5 liter	10 liter
0,5 L/min.	13 timer 20 min.	16 timer 40 min.	33 timer 20 min.	66 timer 40 min.
1 L/min.	6 timer 40 min.	8 timer 20 min.	16 timer 40 min.	33 timer 20 min.
1,5 L/min.	4 timer 26 min.	5 timer 33 min.	11 timer 6 min.	22 timer 13 min.
2 L/min.	3 timer 20 min.	4 timer 10 min.	8 timer 20 min.	16 timer 40 min.
2,5 L/min.	2 timer 40 min.	3 timer 20 min.	6 timer 40 min.	13 timer 20 min.
3 L/min.	2 timer 13 min.	2 timer 46 min.	5 timer 33 min.	11 timer 06 min.
4 L/min.	1 timer 40 min.	2 timer 05 min.	4 timer 10 min.	8 timer 20 min.
5 L/min.	1 timer 20 min.	1 timer 40 min.	3 timer 20 min.	6 timer 40 min.
7 L/min.	0 timer 57 min.	1 timer 11 min.	2 timer 22 min.	4 timer 45 min.

Sikkerhedsforskrifter



Telefon 44 92 35 44

Tobaksrygning samt brug af åben ild er forbudt i nærheden af ilt-udstyr.

Anvend aldrig olier, fedt og lignende på ilt-udstyret, ilt kan gå i kemisk forbindelse med fedtstofferne.

Forsøg aldrig selv at reparere ilt-udstyret.

Følg altid lægens ordning af ilt. Du må kun ændre forbruget efter aftale med din læge!