

NIV

Hurtig start

Start Behandling

1. Påfør masken korrekt, som anvist af NIV sygeplejersken (se billeder på maske-poseden).
2. Tryk på START/STOP-knappen øverst på enheden



Stop Behandling

1. Tryk på START/STOP-knappen øverst på enheden.
2. Fjern masken.
3. Søvnrapporten på skærmen viser nu det antal timer, enheden blev brugt i løbet af den sidste nat.



👍 > 6 timer

👎 < 6 timer

Brug MINIMUM 6 timer hver nat!




Brugermanual

Klargøring




1

Sæt apparatet på en stabil jævn overflade, tag fat i fastholdelsesclipsen bag på apparatet, og træk opad for at åbne. Slut strømstikket til strømindtaget på apparatet og skub derefter fastholdelsesclipsen

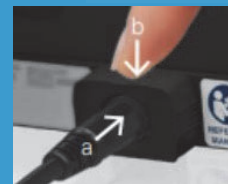


2

Sæt luftslangen godt fast i luftudtaget på bagsiden af apparatet.

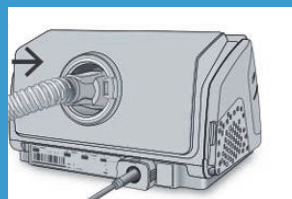


3

Åbn fugteren, og fyld den med vand op til mærket for maksimalt vandniveau. Fyld ikke fugteren med varmt vand. Luk fugteren, og sæt den ind i siden af apparatet.


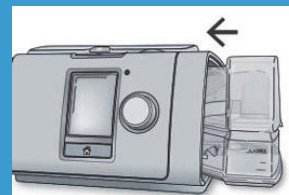


4

Sæt luftslangens frie ende godt fast på den samlede maske.

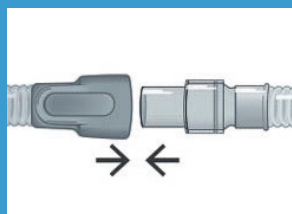

Hvis ordineret ilt.
Tilkoble iltten på
slangen

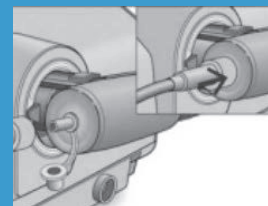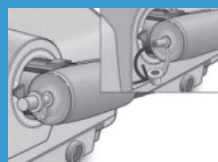

Telefon 44 92 35 44



Rengøring

Tør maskinen af med en klud opvredet i mild opvaskemiddel og vand hver dag



1

Slange

Vask i varmt vand tilsat mild sæbe

2

Skyld den grundigt og lad den hænge til tørre

1

Hver uge

Tjek om filteret er ren

3

Skift

Udskift hver 2.måneder



Maske

2

Hver måned

Vask remmene i hånden eller i maskinen ved 30 grader

1

Hver dag

Tør den af med klud med mild sæbe



Mild sæbe:

Opvaskemiddel
Alkohol- og
blegemiddelfri!

Filtre



Fugtkammer

Hurtig start

1

Fyld kammeret med afkølet kogt vand eller demineraliseret vand.
Fuld til **MAX**-linjen



2

Skub kammeret ind i åbningen på apparatet



 > 6 timer

 < 6 timer

Brug MINIMUM 6 timer hver nat!



Type vand, der skal
anvendes = kogt kold
vand eller købt
demineraliseret vand

Kalkaflejring
Rens med en blanding af
klar eddike og varmt vand
(1 del eddike til 10 dele
vand).

Vedligeholdelse af fugtkammer

Dagligt

- Tøm kammeret for resterende vand
- Tør med en ren klud
- Lad det lufttørre

Ugentlig

Rengør med mild sæbe
Skyl kammeret grundigt

Tips til at undgå kondens

1

Placer apparatet under hovedniveau

2

Undgå træk på apparatet

3

Mild temperatur i rummet

4

Undgå direkte sollys og varme