



Patientnasalkateter tilsluttes til den opvarmede slange. Nasalkateteret må ikke slutte tæt til i næsen, der skal være mellemrum mellem næsebor og nasalkateter

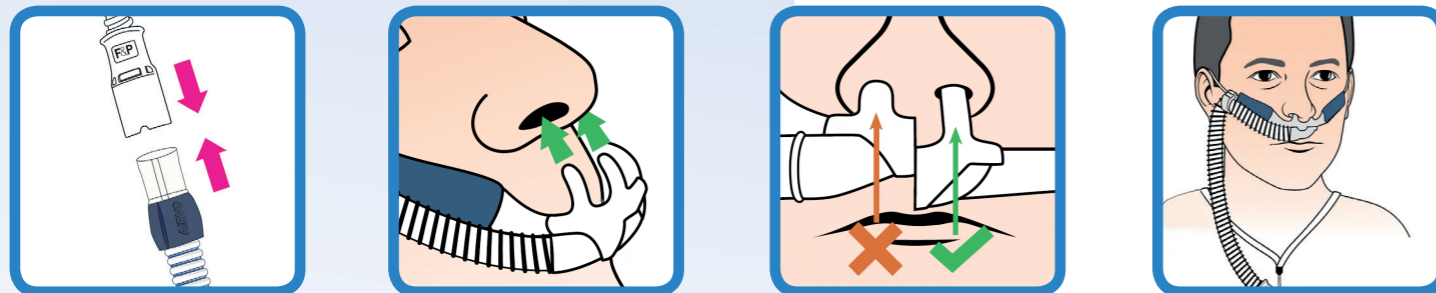

## Du vil skifte sterilt vand

Start med at trække spydet ud af den tomme vandpose. Der må kun trækkes i spydet og ikke i slangen, ellers knækker den og kammeret vil være ubrugeligt. Skub spydet ind i en ny vandpose ved posens bund, og fastgør den sterile vandpose på stativet. Åben ventilationskapslen på siden af spydet. Kammeret vil nu automatisk blive fyldt til det krævede niveau og vil opretholde det niveau, indtil vandposen er tom. Kontrollér, at vandet strømmer ind i kammeret og holdes under fyldningslinjen, som vist. Kammeret må ikke løbe tør for vand. I nedenstående skema findes de omtrentlige anvendelsestider i timer, med en 1 liters steril vandpose, inden for et interval af flow-indstillinger.

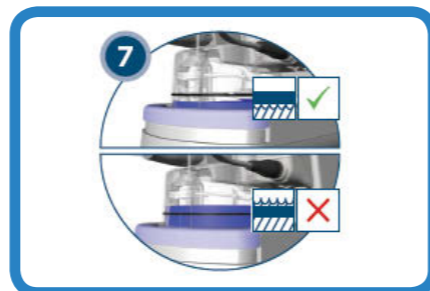

L/min	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
timer	189	75	37	25	18	15	12	10	9	8	7	6	6



Brugervejledning

## Varmvandsfugter

MR950

Telefon 44 92 35 44

Denne folder indeholder en beskrivelse af, hvordan du sikkert og trygt bruger ilt. Er du stadig i tvivl om brugen af ilt, anbefales du at kontakte os.



# Ændre "operation mode" og temperatur

# BRUGSANVISNING

## SKÆRMNAVIGATION



## TÆND/SLUK KNAPPEN

TÆND/SLUK knappen "Power" holdes inde i kort tid for at tænde fugteren. For at slukke skal denne knap holdes inde i et sekund. Når der tændes for luftbefugteren, vil den altid være indstillet til invasiv mode (normalindstilling).

**ADVARSEL:** Hvis patienten er intuberet skal apparatet være indstillet til invasiv mode



Når MR950 startes vil den altid stå på den indstillet standardindstilling som i VitalAire er Optiflow. Det er muligt at ændre indstilling ved at trykke til højre som vist på billede (1), herefter muligheder Invasiv (lilla), Mask (grøn) og Optiflow (blå) kommer frem. Der skal derefter trykkes på den ønskede indstilling.

Hvis der skal ændres på den forudindstillet temperatur, trykkes der midt på skærmen (1). Derefter kommer billede (2) frem, hvor der i standardindstilling Optiflow eller Mask er muligt at vælge mellem 3 temperatur (Optiflow 33, 35 eller 37 grader; Mask 27, 29 og 31 grader; Invasiv er altid 37 grader). Når temperatur er valgt (3) trykkes på flueben til højre. Temperatur er nu indstillet (4)

**OBS!**, når temperatur indstilles på denne måde er den ikke gemt til næste gang.

## ALARMTILSTANDE

Nedenstående er alarmløst tilstande som kan forsøges at afhjælpes. Er det ikke muligt at afhjælpes eller der vises andre alarmer skal der ringes til VITALAIRE.

### Alarmer Tube Fault (Slangefejl)

aktiveres, når befugteren registrerer en potentiel fejl i slangesættet.

Udskift slangesættet, når det er sikkert at gøre det.  
Forsinkelse: <10 sekunder

### Alarmer Disconnection (Frakobling)

aktiveres, når befugteren registrerer en frakobling af inspirationsslangen.

Tilslut inspirationsslangen og sæt kammeret helt ind for at opnå fuldständig tilslutning.  
Forsinkelse: <10 sekunder

### Alarmer No Water (Intet vand)

aktiveres, når befugteren registrerer, at kammeret er tomt eller næsten tomt for vand.

Udskift den tomme vandpose.  
Forsinkelse: <60 minutter\*

### Alarmer High Temperature (Høj temperatur)

aktiveres, når befugteren registrerer en høj temperaturtilstand ved patientenden eller kammerudløbet.

Alarmtærsklen er en temperatur ved patientenden på >43 °C.

### Alarmer Low Temperature (Lav temperatur)

aktiveres, når befugteren registrerer en lav temperaturtilstand ved patientenden eller kammerudløbet i et kontinuerligt tidsrum.

Alarmtærsklen er 2 °C under den indstillede temperatur.

Kontrollér, at befugteren modtager flow inden for det område, som er angivet i brugsanvisningen.  
Kontrollér forbindelserne til flowkilden.  
Forsinkelse: <10 sekunder

Kontrollér, at befugteren modtager flow inden for det område, som er angivet i brugsanvisningen.  
Forsinkelse: >10 minutter



**1+2**

Monter vandkammeret ved at trykke beskytteleskappen ned og skubbe vandkammeret ind, så beskytteleskappen klikker op på plads.

Fjern den gule hætte fra kammeret, ved at trække op i ringen.

**3+4+5**

Påsæt slange til kammer som vist i billede 3. Sæt derefter iltslangen fra koncentrator på (mat slange) den er vist som blå slange på billede 4. Sæt derefter den matte iltslange i masken (se billede 5)

**6+7+8**

Fjern derefter beslaget, der holder vandslangen.

Skub spydet ind i en ny vandpose ved posens bund, og fastgør den sterile vandpose på stativet (se billede 6). Åben ventilation-skapslen på siden af spydet. Kammeret vil nu automatisk blive fyldt til det kræ-vede niveau (se billede 7).

Sæt slange og iltbrille sammen som vist på på billede 8. se korrekt isætning af iltbrille på baggerste side

**RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE** Vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret service personale. En fuldständig teknisk beskrivelse, inklusiv vejledning for rutinemæssig vedligeholdelse samt service data, findes i den tekniske håndbog, som fås fra Deres leverandør eller Fisher & Paykel Healthcare (REF 185041340).